



Uniq

EVA


VENTAJAS

- Sin alergias.
- Base especialmente diseñada para mayor protección.
- La burbuja genera más placer
- El condón y el anillo son independientes
- Es discreto, se puede usar durante el período menstrual.
- Permite el uso de cualquier lubricante.

VER INSTRUCCIONES ADENTRO


COMO UTILIZAR CONDÓN EVA ?

Retírelo cuidadosamente asegurándose de no dañarlo con uñas o joyas. **Desenrolle las ligas, no el condón.**

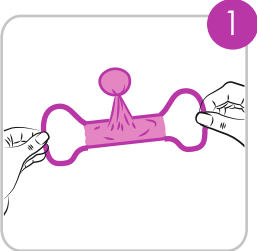



Asegúrate que el anillo mire **hacia la vagina**. Pon las ligas como si fuera un panty.

Introduce la burbuja en la vagina, luego extiende la base, finalmente empuja la burbuja como un tampón. **Asegúrate que la burbuja esté completamente adentro.**

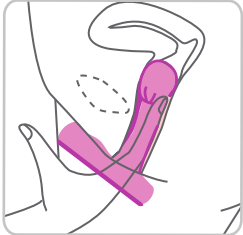

POSICIÓN CORRECTA DE LAS LIGAS


Asegúrate de que las ligas estén a la altura de las caderas.

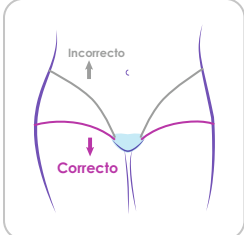

VENTA
DESECHABLES
online.com


Compra tus [condones femeninos Uniq](#) en nuestra tienda online

En la primera penetración guíe el pene hacia el preservativo. Tenga en cuenta que lo debe hacer cada vez que cambie de posición.

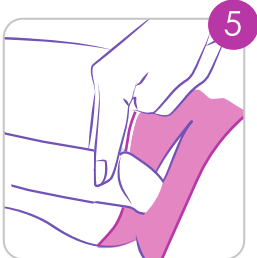

Cuando termines

Aleje su pene del área vaginal. Gira la base. **Quítelo de la vagina como un tampón.** Después de su uso, deseche el condón de forma higiénica

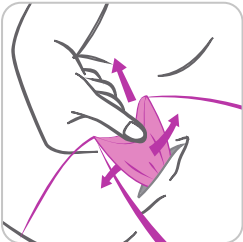

Información

Si cree que su método de anticoncepción ha fallado, póngase en contacto con su médico lo antes posible, preferiblemente dentro de las primeras 24 horas, pero no más tarde de 72 horas.

Si el preservativo o su embalaje presentan signos visibles de daño, no lo use. Deseche el condón dañado y use uno nuevo del paquete intacto.

- Un condón nunca debe ser usado por segunda vez. Si se reutiliza un condón, no ofrecerá la misma protección contra el embarazo o las ITS y tendrá mayores posibilidades de deslizamiento y rotura.

Texto preparado:
Enero-2023
MS-I-ES-2023-1

Conoce las ventajas de UNIQ condoms



Síguenos en:

 [uniqcondoms](#)  [uniqcondones](#)